



UA.TR.099

ІНСТРУКЦІЯ із застосування
АПЛІКУС
паста для зовнішнього застосування

Склад:

100 г (g) препарату містить гідрогель метилкремнієвої кислоти – 69,0 г (g);
міді сульфат – 0,3 г (g).

Допоміжні речовини – вода очищена.

Функціональні властивості:

Аплікус – комбінований медичний виріб на основі гідрогеля метилкремнієвої кислоти з іммобілізованими іонами міді, має адсорбційну та бактерицидну властивості. Адсорбційну здатність має гідрогель метилкремнієвої кислоти. Іони міді мають протимікробну дію внаслідок денатурації білків мікроорганізмів.

Аплікус активний по відношенню до грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів. Завдяки сорбційним властивостям, виріб зв'язує токсичні продукти в тканинах, зменшує прояви місцевої інтоксикації. Внаслідок очищення враженої ділянки шкіри відбувається зменшення місцевих запальних реакцій, стимуляція росту грануляційної тканини, покращення процесу загоєння.

Через уражену шкіру практично не всмоктується, максимальна концентрація міститься у місці використання. Проте при нанесенні медичного виробу на значні ділянки тіла слід враховувати можливість резорбції.

Рекомендації щодо застосування:

Використовують при бактеріальних інфекціях шкіри (фурункули, карбункули, виразки, екземи), що викликані чутливими до препарату мікроорганізмами.

Також використовують при опіках, ранах у пацієнтів з захворюваннями, при яких знижуються регенеративні процеси (цукровий діабет, імунодефіцит та ін.).

При різних формах бешихового запалення.

Застереження щодо застосування.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Дата закінчення терміну придатності вказана для герметично закупореного медичного виробу при правильному зберіганні.

Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Індивідуальна непереносимість компонентів.

Особливі застереження.

Вживання в період вагітності або годування груддю. Аплікус можна застосовувати під час вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при управлінні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.



UA.TR.099

Вживання при загостренні захворювань нирок, нирковій недостатності. Аплікус застосовувати з обережністю.

Діти. Досвіду використання у дітей немає.

Належні заходи безпеки при вживанні.

Аплікус діє лише поверхнево і практично не має резорбтивного ефекту, тому при місцевому використанні не має місцевої подразнювальної дії. Не допускати потрапляння в очі. Медичний виріб не викликає фотосенсебілізацію, не забарвлює шкіру і одяг. Аплікус слід наносити на поверхню після медичної обробки, виріб запобігає адгезії пов'язок, чим полегшує процедуру перев'язок. При тривалому використанні виробу на значні ділянки шкіри необхідно проводити контроль периферичної крові.

Спосіб застосування і дози.

За допомогою тампона нанести пасту тонким шаром на пошкоджену поверхню і закрити пов'язкою. На початковій стадії запалення (1-5 день) – 2 рази в день, змінюючи пов'язку; після зменшення запальних процесів, очищення рани від гнійно-некротичних виділень, появи грануляції і епітелізації рани – 1 раз на день. Для лікування опіків Аплікус нанести на пошкоджену поверхню і зафіксувати за допомогою стерильної пов'язки. При перев'язці ділянку шкіри обробляють стандартно або спеціальними хірургічними тампонами для ран. Використання медичного виробу можливе на різних ділянках тіла опікового хворого. Курс лікування – 10-14 днів. При необхідності можливе використання через 2-3 тижні.

Передозування.

При передозуванні можливі алергічні реакції, які вимагають відміни прийому і проведення десенсибілізуючої терапії.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість (алергія) до будь-якого компоненту медичного виробу.

Взаємодія з лікарськими засобами і інші види взаємодії.

Не встановлено, але можливе посилення дії при місцевому використанні з антибіотиками, а також антисептичними препаратами, які мають бактерицидний ефект.

Термін придатності. 3 роки.









Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці. Після відкриття зберігати щільно закритим, оберігаючи від висихання.

Упаковка.

Туби по 90 г.

Тлумачення символів, які наведені на маркуванні.

Познака	Назва позначки
	Виробник
	Дата виготовлення
	Використати до
	Код партії
	Користуйтеся інструкцією із застосування
	Попередження
 25°C	Верхня межа температури не вище 25°C
	Знак відповідності технічним регламентам
UA.TR.099	Ідентифікаційний номер ООВ ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

Виробник.

ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ», Україна, 03124, Київ, вул. Радищева, 3, (044) 206 21 59,
e-mail: kreoma@nbi.com.ua

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 2022-06-17.